

GRÖN PATRON



Grön patron används för att skicka provrör med elektronisk beställning för automatisk hantering på Klinisk kemi.

I varje fack kan två provrör placeras och totalt kan sex provrör skickas i samma patron. Det är viktigt att provrören trycks ner ordentligt i insatsen så att de sitter fast. När två provrör placeras i samma fack ska dessa stoppas in åt samma håll.

Provrör som ska skickas i grön patron:

- Långa provrör (rörstorlek 7 ml) i plast med elektronisk beställning
- Korta provrör (rörstorlek 5 ml) i plast med elektronisk beställning



OBS! Följande prover får INTE skickas i rörpost:

- Blodgaser (arteriella och venösa)
- Cerebrospinalvätska
- Benmärgsprover

RÖD PATRON



Röd patron används för att skicka provrör med pappersremiss samt provrör som inte kan hanteras automatiskt på Klinisk kemi. Provrör samt pappersremiss packas i avsedd plastficka och rullas ihop med gummiband runt.

Provrör som ska skickas i röd patron:

- Provrör med pappersremiss
- Provrör för faeces
- Provrör med konformad botten
- Provrör med skruvkork
- Provrör i glas
- Provrör för luftvägspanel
- Kapillära provrör



OBS! Följande prover får INTE skickas i rörpost:

- Blodgaser (arteriella och venösa)
- Cerebrospinalvätska
- Benmärgsprover